

Registrieren Sie dieses Test-Kit unter [www.epi-age.de/register](http://www.epi-age.de/register)



**WICHTIG:** IHR TEST KANN NICHT BEARBEITET WERDEN, SOLANGE SIE IHR KIT NICHT MIT IHRER SECURE ID REGISTRIERT HABEN.

**ACHTUNG:**  
**30 MINUTEN VOR DER SPEICHELPROBE NICHT ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN, KAUGUMMI KAUFEN, ZÄHNEPUTZEN ODER MUND SPÜLEN**

BITTE NEHMEN SIE AM TAG DER PROBENABGABE KEINE COLLAGEN-HALTIGEN SUBSTANZEN ZU SICH.

## Ihre digitale Secure ID



Dein biologisches Alter

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Probe oder Ergebnissen haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Secure ID an uns.

E-Mail: [support@epi-age.de](mailto:support@epi-age.de)  
[www.epi-age.de/support](http://www.epi-age.de/support)

Anschrift:  
epiAge Deutschland  
Jakob-Klar-Straße 4  
80796 München

## epiAge Gebrauchsanweisung

### TEST-KIT ZUR SPEICHEL SAMMLUNG

Nehmen Sie sich 3-5 Minuten Zeit

## WARNHINWEISE

- Verschlucken Sie nicht die Konservierungsflüssigkeit aus dem Teströhrchen und vermeiden Sie Augenkontakt
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



**1** Schrauben Sie vorsichtig die blaue Kappe vom Röhrchen mit der Konservierungsflüssigkeit ab und schrauben Sie den Trichter darauf.

**Wichtig:** 30 Minuten vor der Speichelprobe NICHT essen, trinken, rauchen, Zähneputzen, Kaugummi kauen, etc...



**2** Spucken Sie mehrmals sauberen Speichel (keinen Schleim) in den Trichter, den Sie jetzt am Sammelröhrchen befestigt haben, bis das Röhrchen zur Pfeilmarkierung (5ml) gefüllt ist.

**Zu beachten:** Spucken Sie geduldig mehrmals hintereinander in den Trichter. Lassen Sie sich zwischen den Spuckvorgängen Zeit.



**3** Schrauben Sie den Trichter vorsichtig ab, um ein Verschütten des gesammelten Speichels zu verhindern.

*Der Trichter kann entsorgt werden.*



**4** Das Sammelröhrchen mit der blauen Verschlusskappe fest verschließen. Das verschlossene Röhrchen kopfüber 10-15 mal schütteln, um sicherzustellen, dass der Speichel und die Konservierungsflüssigkeit vollständig vermischt werden.



**5** Das Röhrchen in den beigelegten Schnellverschlussbeutel geben.



**6** Bitte bewahren Sie dieses Merkblatt sorgfältig auf, da Sie Ihre digitale Secure ID zum Abruf Ihres Testergebnis benötigen.



**7** Schicken Sie die Speichelprobe mit dem bereits frankierten Umschlag an uns zurück.

*Rücksendungen aus Österreich und der Schweiz bitte ausreichend frankieren.*



**8** Registrieren Sie das Test-Kit unter [www.epi-age.de/register](http://www.epi-age.de/register)

**Ohne Registrierung können Sie Ihr Testergebnis NICHT abrufen.**

Hersteller:



HKG epi THERAPEUTICS Ltd.  
Unit 313-315, 3/F Biotech Centre 2,  
11 Science Park West Avenue  
Hong Kong Science Park  
Shatin, N.T., Hong Kong

© 2021 | epiAge Deutschland | in Kooperation mit  
HKG epiTherapeutics Ltd. Alle Rechte vorbehalten.